

YourMASK

MASCHERINA IN MATERIALE TRASPARENTE
CHE CONSENTE IL RICONOSCIMENTO DEL VISO.
2 TIPOLOGIE DI FILTRI INTERCAMBIABILI

**RIUTILIZZABILE, FACILISSIMA DA STERILIZZARE
SIA A CALDO CHE A FREDDO.**

MASCHERINA PROTETTIVA PER LA FILTRAZIONE DI POLVERI,
PARTICELLE E VIRUS CON FILTRO INTERCAMBIABILE
(USO: industria sanitaria, tessile, mineraria, edile, lavorazione del ferro e
dell'acciaio, industria automobilistica, lavorazione del legno, attività
agricole e ortofrutticole, industria alimentare, ecc...)

CORPO RESPIRATORE IN MORBIDO MATERIALE TECNICO*, CON
GUARNIZIONE COMFORT IN MED M** PER UNA PERFETTA ADERENZA

ELASTICI ERGONOMICI: COMFORT DIETRO ALLE ORECCHIE

TRATTAMENTO CON ANTIBATTERICO

DISPONIBILE CON FINITURE IN **COLORI MODA**

FILTRI INTERCAMBIABILI:

- IN **POLYBIOTECH**, 100% POLIESTERE RICICLATO,
BIODEGRADABILE al 97%, **RIUTILIZZABILE** OLTRE 15 VOLTE
(PREVIA STERILIZZAZIONE)
- IN **TNT 65+100gr/mq**, **MONOUSO**



LAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE



PRODOTTO E
CONFEZIONE
RICICLABILI



PRODOTTO
RIUTILIZZABILE



MINOR
CONSUMO
DI MATERIA
PRIMA

* ASETTICO, STERILIZZABILE, LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE, 100% RICICLABILE

** MED M è un ELASTOMERO TERMOPLASTICO A BASE STIRENICA



Blocca il virus ma non il tuo sorriso



YourMASK


ISTRUZIONI PER L' UTILIZZO DI YOUR MASK:

Togliere il CORPO MASCHERA dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la sua integrità e assicurarsi di una corretta sterilizzazione mediante bollitura o sanificazione mediante soluzioni alcoliche sterilizzanti.

TRATTATO con ANTIBATTERICO

MONTAGGIO DEGLI ELASTICI:

inserire le estremità di un elastico nelle apposite guide (1) su un lato del corpo maschera. Fare la stessa cosa sull'altro lato. Indossare la maschera e regolare gli elastici AUTOBLOCCANTI tirando le estremità fino al comfort desiderato e comunque ben aderente al viso. È possibile tagliare le eccedenze di elastico sulla parte anteriore della mascherina. Grazie alla particolare struttura dell'elastico, la parte arrotondata che appoggia dietro alle orecchie permette un uso prolungato della *Your Mask*.

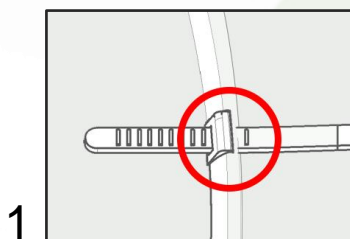


GRAZIE ALLA SUA PARTICOLARE STRUTTURA E L'UTILIZZO DI MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI, LA MASCHERINA GARANTISCE COMFORT ANCHE IN CASO DI UTILIZZO PROLUNGATO.
SI CONSIGLIA COMUNQUE, DOPO ALCUNE ORE DI UTILIZZO, DI TOGLIERE LA MASCHERINA PER CIRCA 1 MINUTO, SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORME DI PROTEZIONE DAL COVID-19

MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEL FILTRO:

sganciare l'elemento anteriore circolare porta filtro dal corpo maschera esercitando una trazione (sistema ad incastro per pressione), alloggiare ben disteso il filtro nel modello scelto sulla parte interna del porta filtro, riagganciare tramite pressione sul foro anteriore del corpo maschera.

Prima di questa operazione **lavarsi le mani ed indossare dei guanti** per prevenire la contaminazione del filtro stesso.

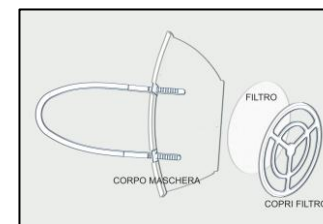

STERILIZZARE* O SOSTITUIRE IL FILTRO OGNI VOLTA CHE LA MASCHERINA VIENE USATA/STERILIZZATA

* SOLO FILTRO RIUTILIZZABILE IN POLYBIOTECH

ISTRUZIONI PULIZIA-MANUTENZIONE:

L'intera mascherina (corpo maschera, portafiltro ed elastici), è riutilizzabile dopo processo di sterilizzazione in acqua bollente o sanificazione mediante soluzioni alcoliche sterilizzanti o lampade UV dedicate.

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce

PRESTAZIONI:

YOUR MASK è una mascherina facciale filtrante con filtro intercambiabile, non chirurgica e o DPI.

Grazie al suo sistema con guarnizione aderisce perfettamente al viso, migliorando le prestazioni rispetto ad una normale mascherina chirurgica.

***YOUR MASK* è in fase di certificazione come chirurgica tipo IIR**



ITALICA tech
Innovation&Sustainable trade